


## Aufbau der DeCube™

1. Der exklusive Stratos™-Bezug reduziert Reibungs- und Scherkräfte, ist antistatisch, antibakteriell, wasserundurchlässig, leicht zu reinigen und zu desinfizieren.
2. Die weiche druckauffangende Schicht leistet großen Liegekomfort insbesondere bei Schmerzpatienten und verhindert bei herausgenommenen Elementen eine Randödembildung.
3. Herausnehmbare Elemente [5x3 Würfel im Rumpfbereich, 3 Quader im Fußbereich] gewährleisten extrem niedrige Druckwerte in besonders gefährdeten Bereichen. Diese Möglichkeit hilft Ihnen die Durchblutung zu verbessern, Schmerzen zu reduzieren und die Wundheilung zu fördern.
4. Das Unterteil des DeCube-Systems besteht aus einem besonders verschleißfesten Material.
5. Die einzelnen Schichten des qualitativ hochwertigen Engineered Polymer Materials gewährleisten viele Jahre eine effiziente Druckreduzierung.
6. Die zusätzlich eingebaute Randzonenverstärkung ermöglicht ein sicheres und einfaches Umlagern und Mobilisieren des Patienten.
7. Die vier, an den Seiten angebrachten Griffe erleichtern das Handling und den Transport.

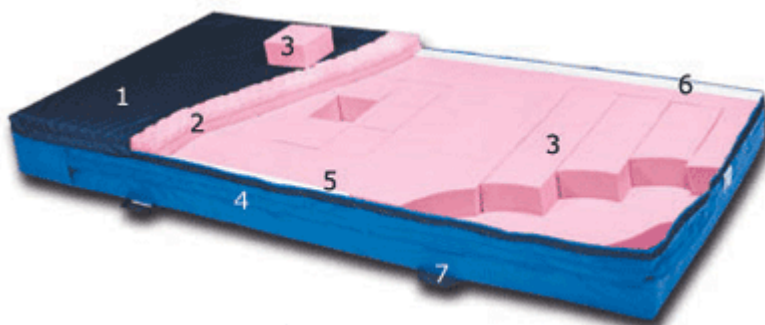

## Anwendungsmöglichkeiten

Durch die Entfernung von Blöcken kann das System individuell an die Bedürfnisse jedes Patienten angepasst werden.

1. Gezielte Druckentlastung bei Druckgeschwüren oder Risikozonen durch Herausnehmen einzelner Elemente in den betroffenen Bereichen.
2. a) 30 ° Lagerung  
Entnehmen Sie eines der Querelemente 16, 17 oder 18 und legen es längs in den Bereich 4-10 links oder 6-12 rechts. Wechseln Sie die Seiten im üblichen Lagerungsintervall
- 2.b) Fersenfreilagerung  
Stellen Sie Element 16 hochkant und legen Sie die Elemente 17 und 18 nach Innen daran an (in Richtung Gesäß).
- 2.c) Sitzpositionierung  
Entnehmen Sie eines der Längselemente 16, 17 oder 18 und legen es quer unterhalb des Bereichs 13-15.
3. Anmerkungen  
Maximal 2 zusammenhängende Elemente entnehmen, da der Hohllagerungs-Bereich sonst zu groß wird und die Druckentlastung geringer wird

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

16
17
18

Kopf- und Fußende der DeCube™ sind gekennzeichnet, um ein falsches Einlegen in das Bettgestell zu verhindern.  
Der Bezug lässt sich absichtlich nicht straff ziehen, damit ein Spanneffekt vermieden wird