

## Safehip® Aktiv

### Sicherheitsgürtel mit eingenähten Pads und Klettverschluss



#### Safehip® gibt Sicherheit und schützt

- Sofortschutz gegen Oberschenkelhalsfrakturen
- Fast 100% der Oberschenkelhalsfrakturen können verhindert werden
- Sind als einzige Hüftprotektoren an mehr als 5000 Personen weltweit getestet
- Wirksamkeit in mehreren Studien nachgewiesen
- Für jeden individuell das passende Modell: in den Größen S, M, L, XL, XXL

#### Safehip® Wirkprinzip

Die Wirkung beruht auf einer speziell entwickelten Kombination von

- Umverteilung der Sturzenergie vom Oberschenkelhalsknochen in das umliegende Weichteilgewebe
- Vergrößerung des Aufprallareals durch die Protektor-Pads
- Energieabsorption in den Protektor-Pads

Safehip® Aktiv wurde speziell für den schnellen und unkomplizierten Gebrauch entwickelt.

Der Safehip-Gürtel eignet sich besonders für Menschen, die einen Hüftprotektor nur für eine bestimmte Zeit oder in bestimmten Situationen benötigen.

Das einzigartige Gürteldesign ermöglicht ein unkompliziertes Anlegen und sieht gleichzeitig attraktiv aus, egal, ob Safehip® Aktiv über oder unter der Kleidung getragen wird. Safehip® Aktiv ist sehr angenehm zu tragen. Der perfekte Sitz gibt Halt, verbessert die Körperhaltung und vermittelt Sicherheit beim Gehen.

Der Gürtel muss so angelegt werden, dass beide Oberschenkelhalsknochen durch die Schutzpads in Safehip® Aktiv auch wirklich geschützt sind.

#### Safehip® Aktiv besteht aus

##### Gürtel

78 % Polyester und 22 % Elasthan,  
Farbe: schwarz

##### SOFT-Pad

Thermoformed cellular Polyolefin

Safehip® Aktiv ist in den Größen S, M, L, XL und XXL erhältlich:

| Größe | Tailienweite cm |
|-------|-----------------|
| S     | 85-95           |
| M     | 95-105          |
| L     | 105-115         |
| XL    | 115-125         |
| XXL   | 125-140         |

#### Pflege

Safehip® Aktiv kann inklusive der Pads in einer Waschmaschine gewaschen werden und nach Belieben, auch im Trockner bei mittlerer Temperatur getrocknet werden.

Die Waschtemperatur beträgt maximal 40°C. Vor dem Waschen sind die Klettverschlüsse zu schließen. Es wird die Verwendung eines Wäschenetzes empfohlen. Keine Bügelpresse!

#### Vorsichtsmaßnahmen

In sehr seltenen Fällen (z.B. Unfall, Sturz auf das Gesäß) sind Oberschenkelhalsbrüche trotz Anwendung von Safehip® nicht auszuschließen.

Safehip® wurde nicht zum Schutz vor Sportunfällen entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.safehip.at>